
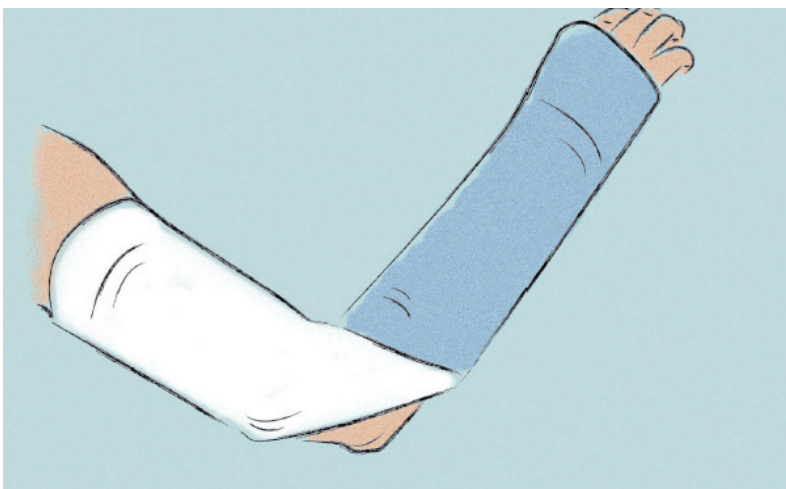


Anlagetechniken Nemoa Splint

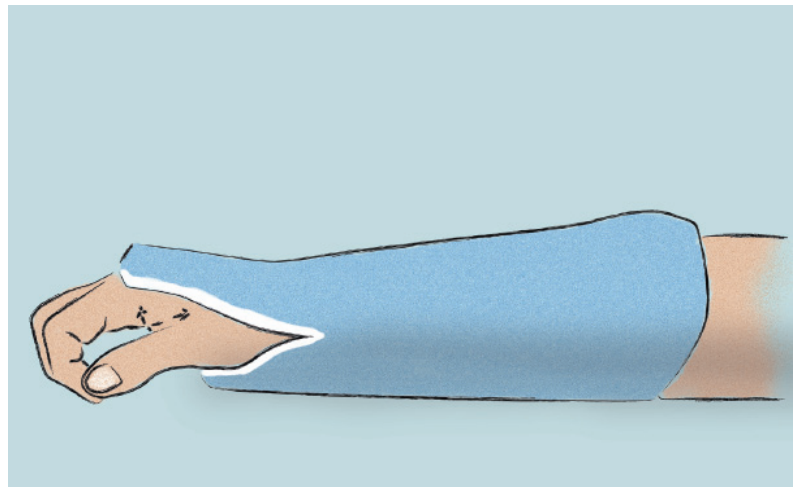

Nemoa Splint / Nemoa Splint PreCut

Allgemeine Hinweise

- gepolsterte Schiene
- imprägnierte Polyester-Filzmatte
- spezielles Verschluss-System
- einfache Anwendung


Produktvorteile

- keine scharfen Kanten
- glasfaserfrei
- hypoallergenes, hautfreundliches Polsterfilz
- aus Spenderbox (4,5m) oder als Fertigabschnitt (PreCut) in allen notwendigen Größen verfügbar

Auswahl der Schienen

Benötigte Schienenbreite auswählen.

- 5,0cm
- 7,5cm
- 10,0cm
- 12,5cm

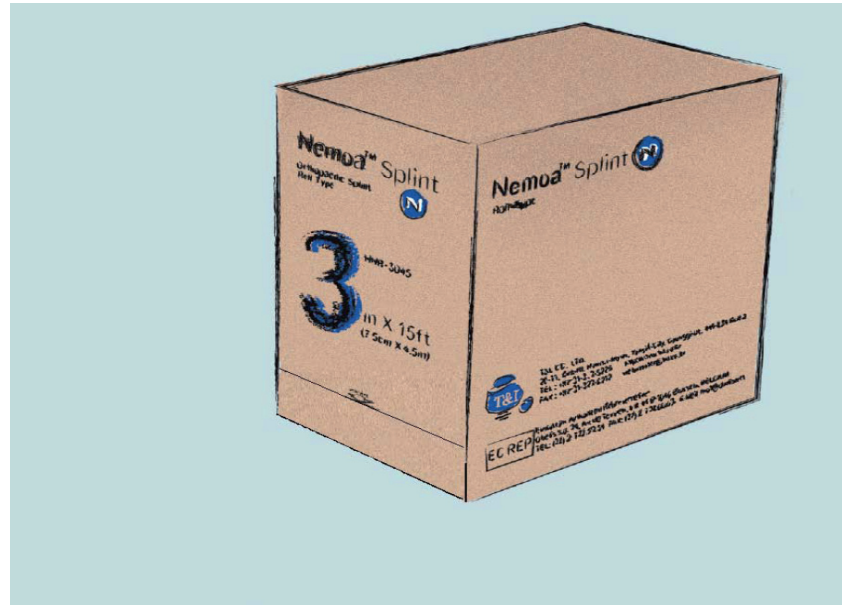

Länge der Schienen

Den verpackten Splint in der benötigten Länge aus dem Karton herausziehen.

Mit einer Verbandschere abschneiden.



Verschluss der Verpackung

Nach dem Abschneiden Splint **ca. 10cm weit in der Folienverpackung** nach hinten umfalten.




Verschluss der Verpackung

Die überstehende Folienverpackung 3-4cm lang umfalten.



Verschluss der Verpackung

Den beiliegenden orange-gelben Patentverschluss mit dem gelben Pin in die Falte einfädeln.

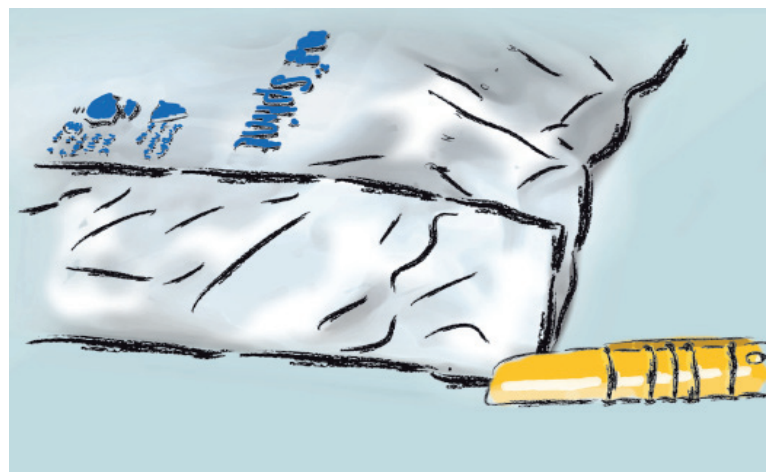

Verschluss der Verpackung


Anschließend den Verschluss bis zum Anschlag durch die Falte schieben.



Weißes hypoallergenes Polsterfilz

Muss nicht benetzt werden.


Zur trockenen Anlage der
Schiene auf der Haut des
Patienten.

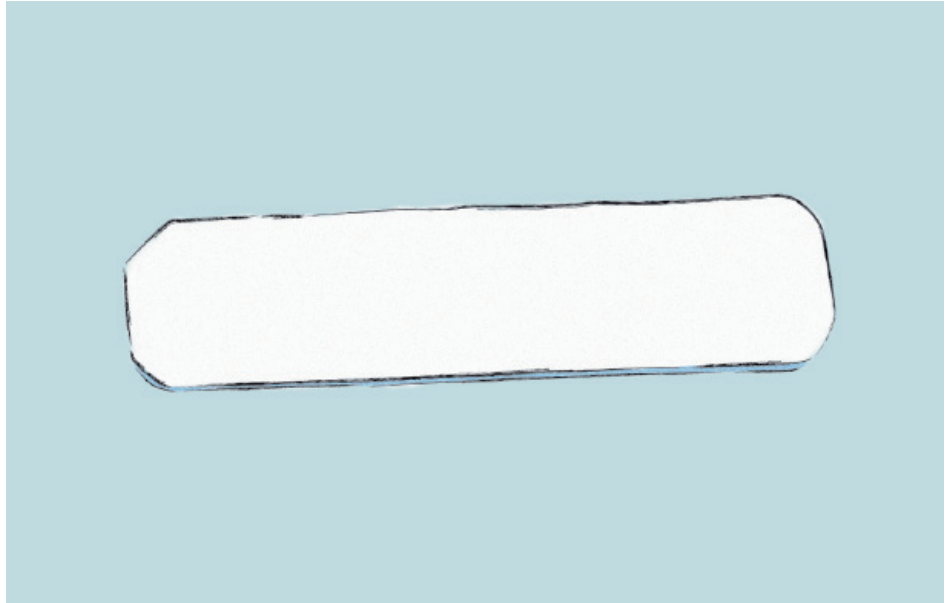

Blaues hydrophiles Polsterfilz


Diese Seite wird angefeuchtet.

Unter fließendem Wasser
oder mit der Sprühflasche
benetzen (Wasser kann mit
flacher Hand leicht durch
das Polster in die Schiene
gedrückt werden).

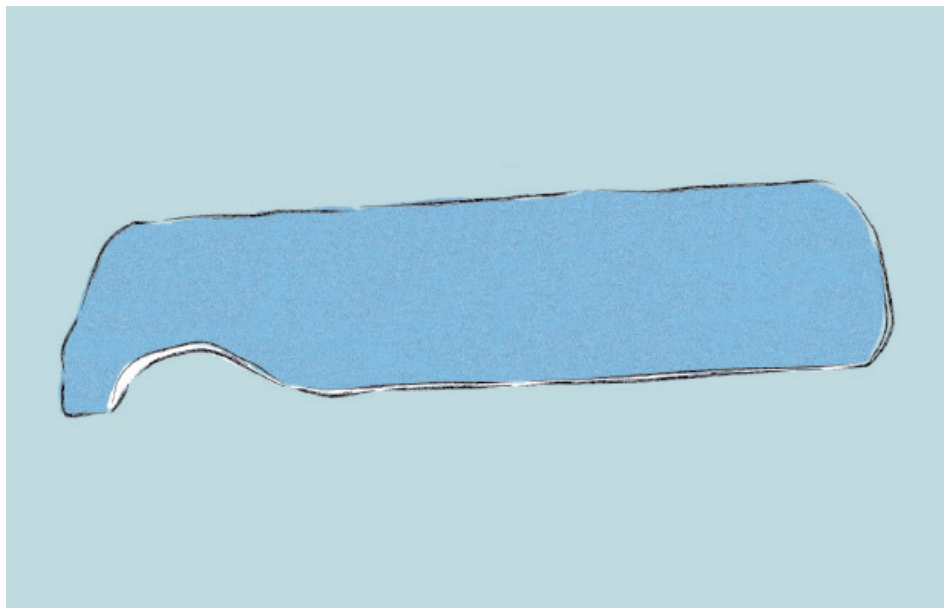

Alternative Aktivierung


Filz an einer beliebigen Seite
öffnen, innenliegende Filz-
matte in Wasser tauchen,
auswringen und wieder in
die Polsterung einlegen.

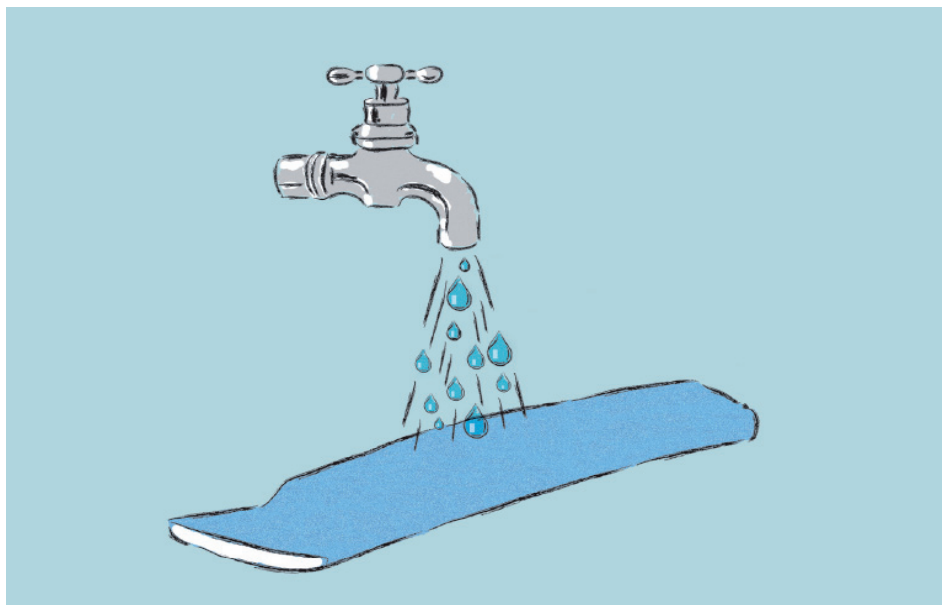

Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.


Die Schiene dorsal anlegen, vor den Mittelhandknöcheln schräg ab- und den Daumen halbrund ausschneiden.

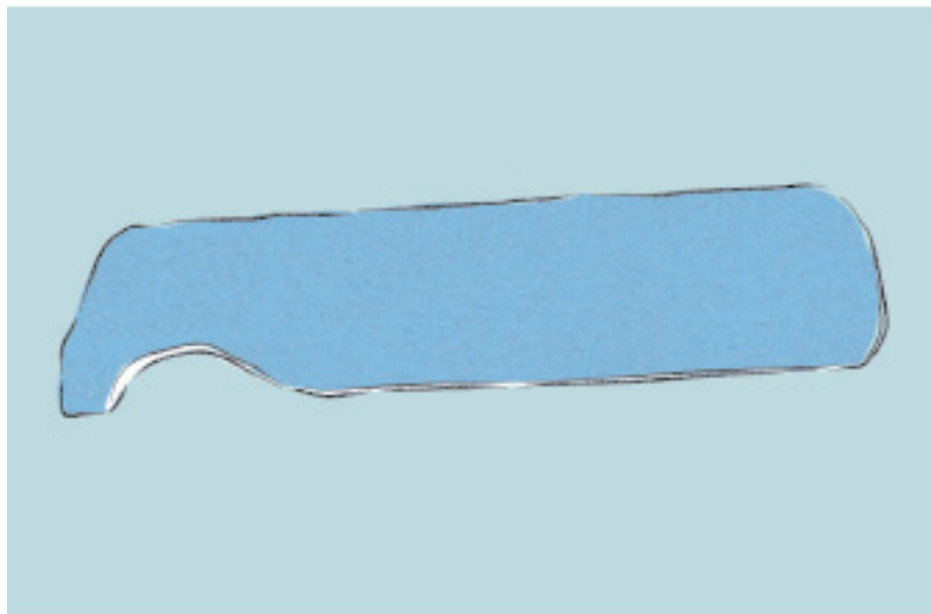

Anlage


Nach dem Anfeuchten die Schiene dorsal anlegen, die überstehende Zunge zwischen Daumen und Zeigefinger legen und die Schiene anwickeln.

Anmodellieren und aushärten lassen.

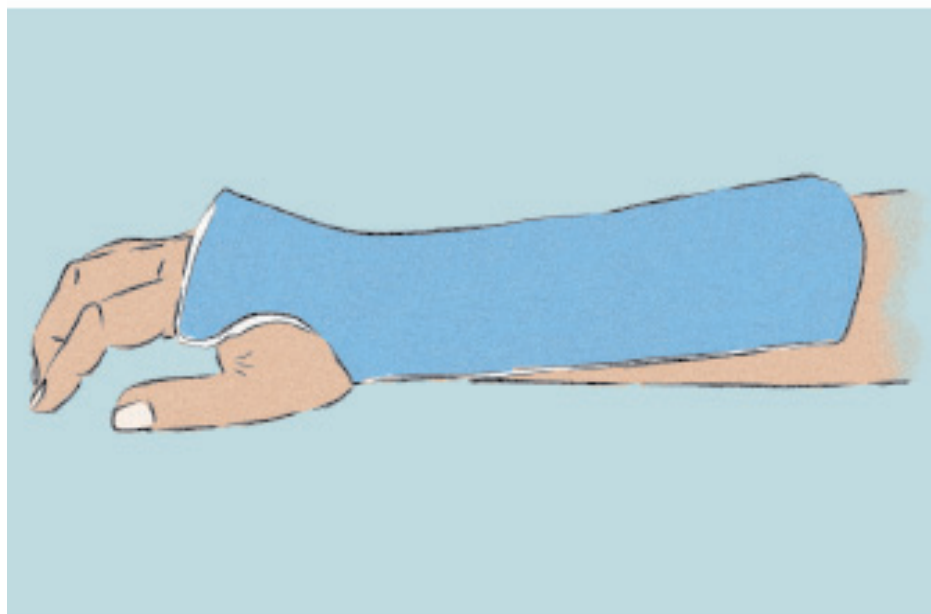

Modell der fertigen Schiene

Das Schnittmuster kann auch als volare Schiene verwendet werden.

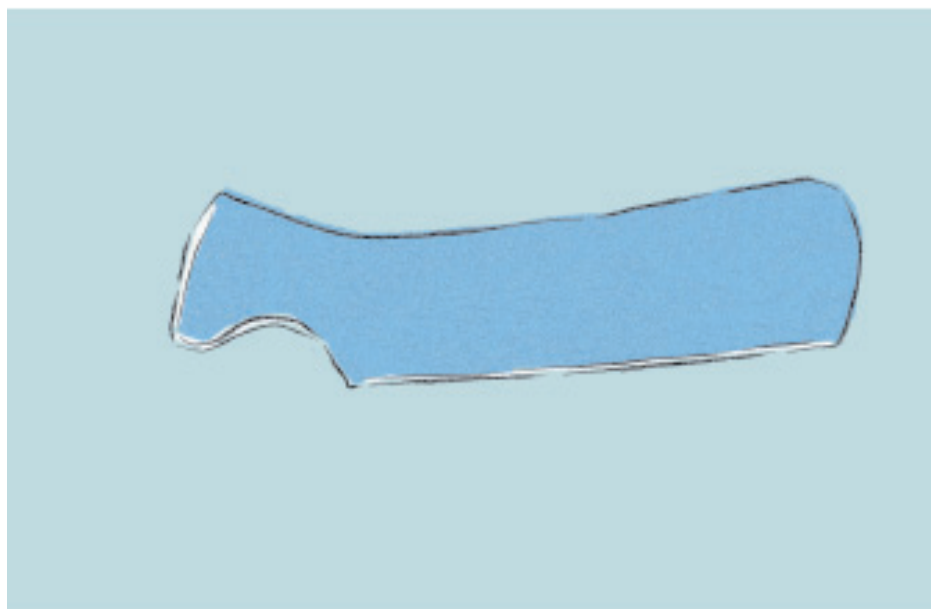


Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.

Die Schiene dorsal anlegen, am Zeigefinger entlang 10-12cm einschneiden.


Den schmalen Steg um 1-1,5cm kürzen.

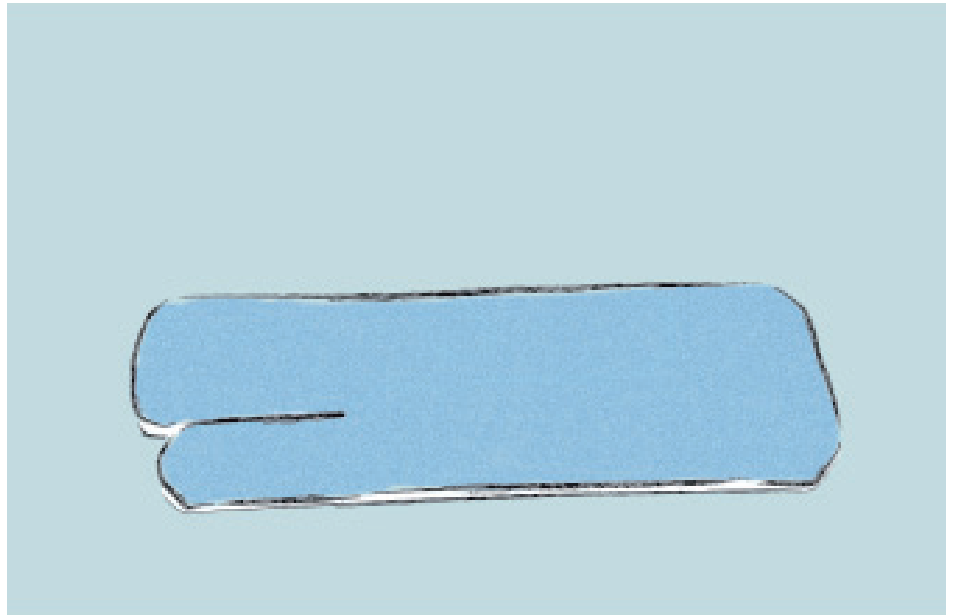


Anlage

Nach dem Anfeuchten die Schiene dorsal anlegen, den schmalen Steg unter dem Daumenballen herumführen und die Schiene anwickeln.

Anmodellieren und aushärten lassen.

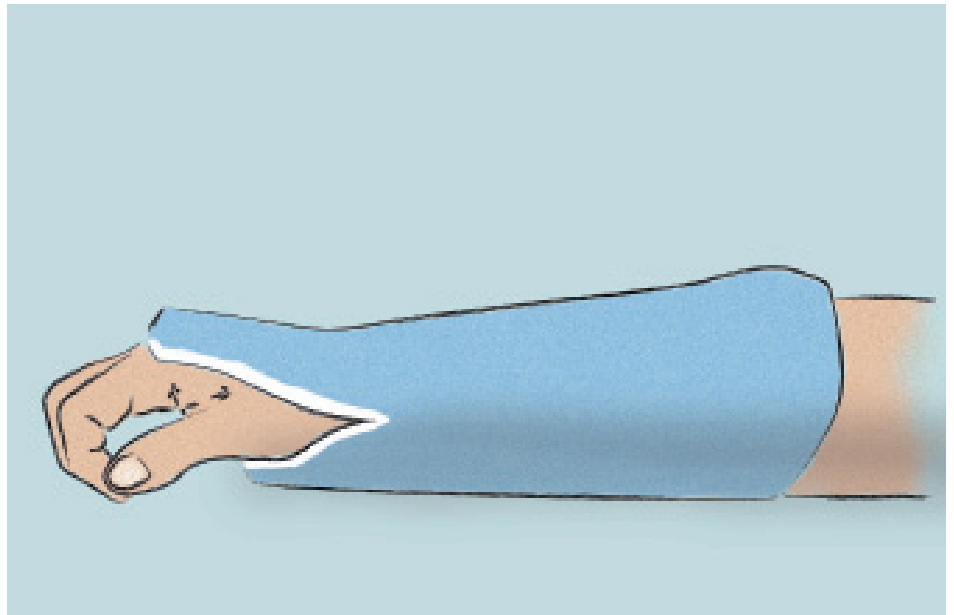


Modell der fertigen Schiene

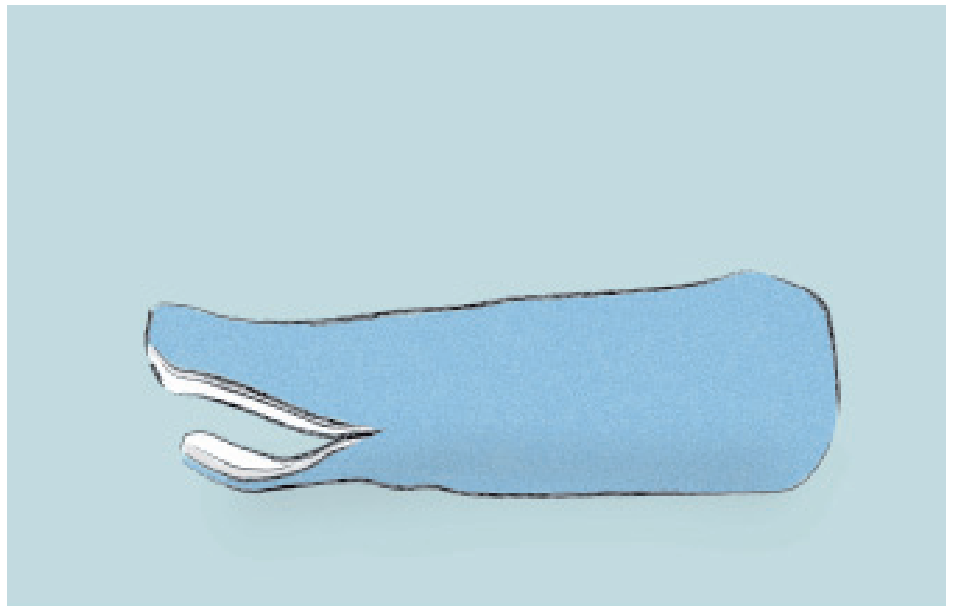

Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.


Die Schiene volar anlegen, entlang der distalen Handlinie abschneiden und dabei eine Zunge (abhängig von der Daumenbreite) aussparen.

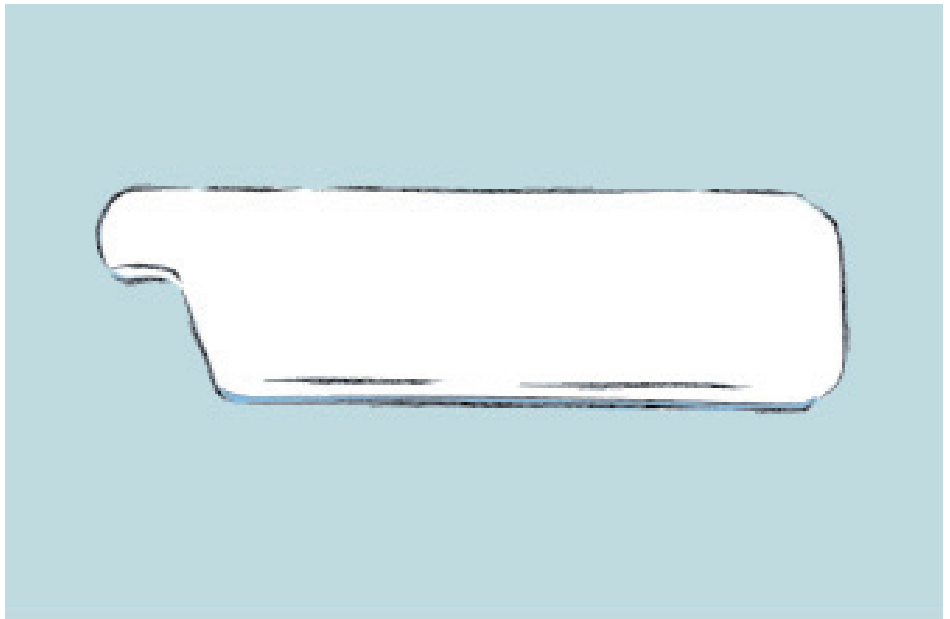


Anlage

Nach dem Anfeuchten die Schiene volar anlegen, die Zunge um den Daumen herumführen und die Schiene anwickeln.

Anmodellieren und aushärten lassen.

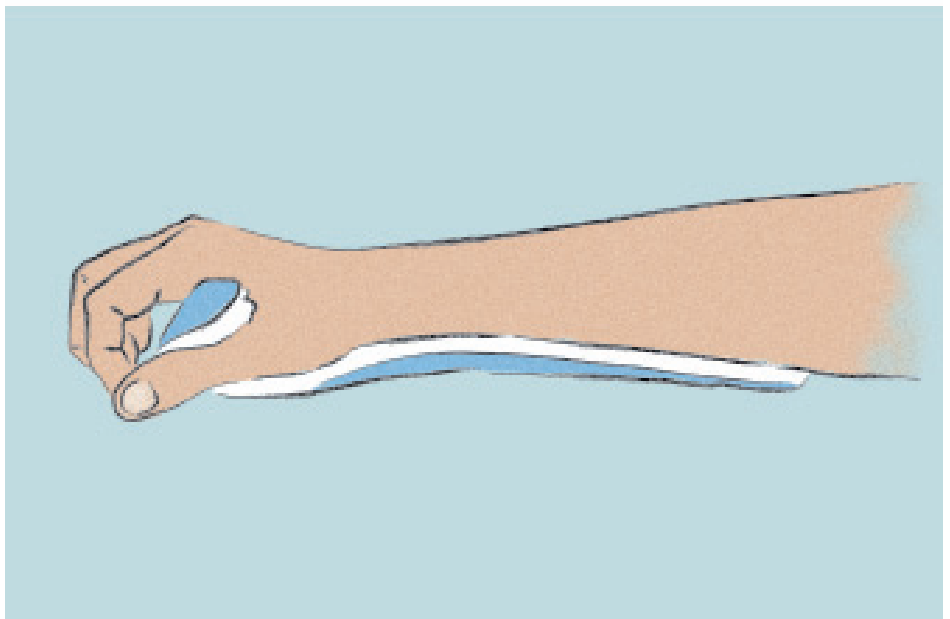

Modell der fertigen Schiene

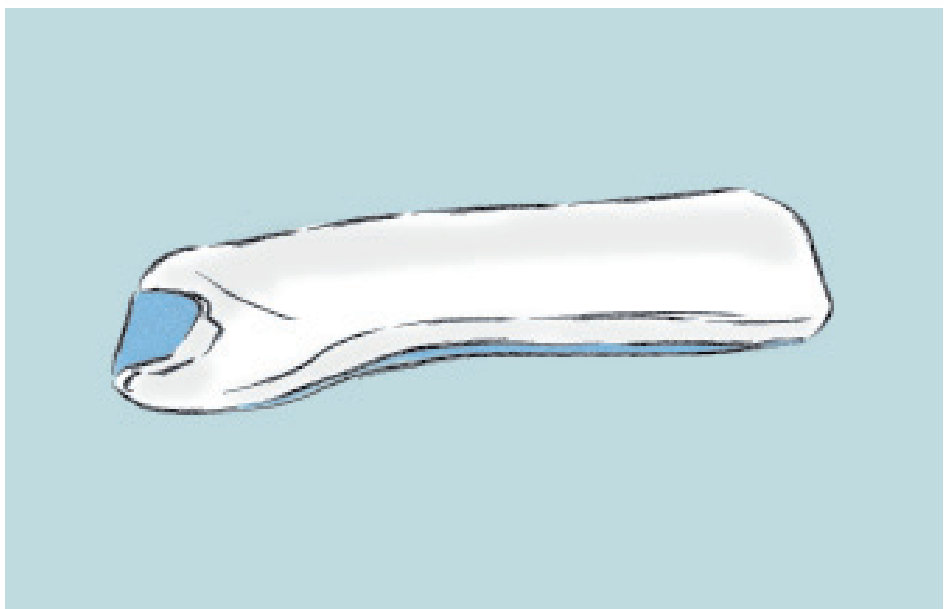

Schnittmuster

Von der 5cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.


Die Schiene volar anlegen, um den Daumen führen und distal je nach Daumenlänge schräg abschneiden.




Anlage

Nach dem Anfeuchten die Schiene volar anlegen, um den Daumen herumführen und die Schiene anwickeln.

Anmodellieren und aushärten lassen.

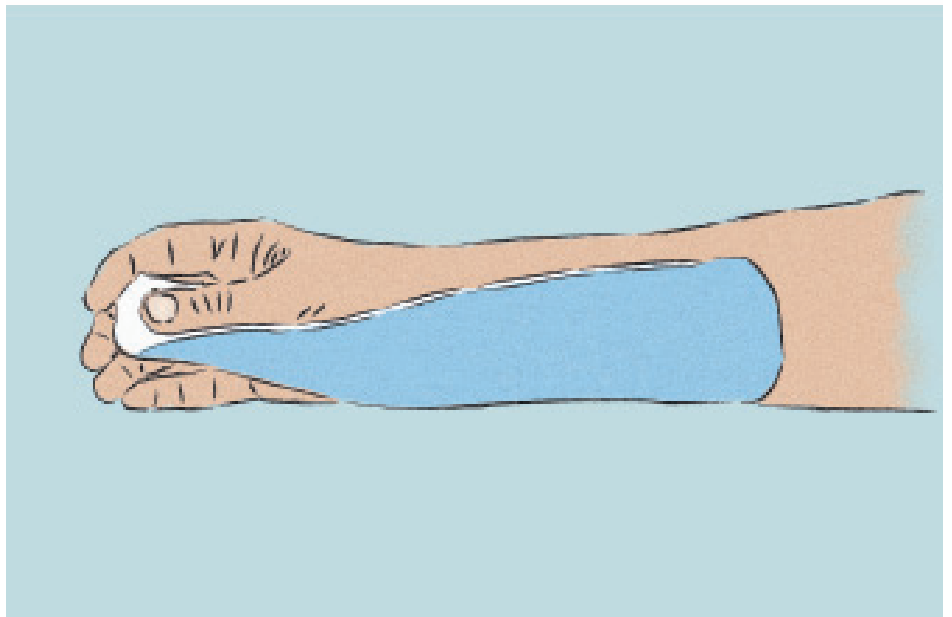


Modell der fertigen Schiene

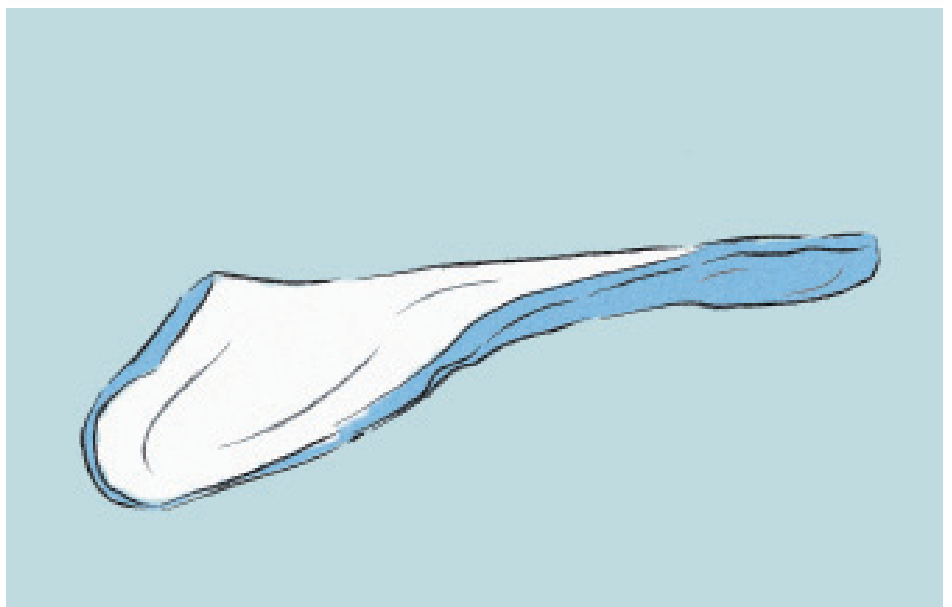

Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.


Die Schiene volar anlegen und -je nach Anzahl der zu immobilisierenden Finger- die entsprechende Breite ausschneiden.

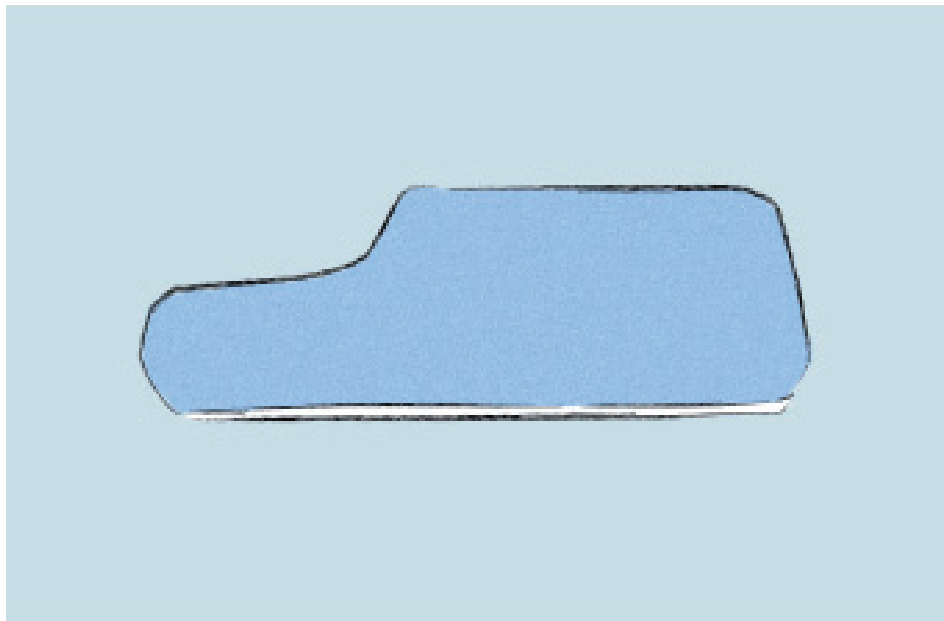

Anlage


Nach dem Anfeuchten die Schiene volar anlegen und anwickeln.

Die Schiene in der gewünschten Position (intrinsic plus) anmodellieren und aushärten lassen.

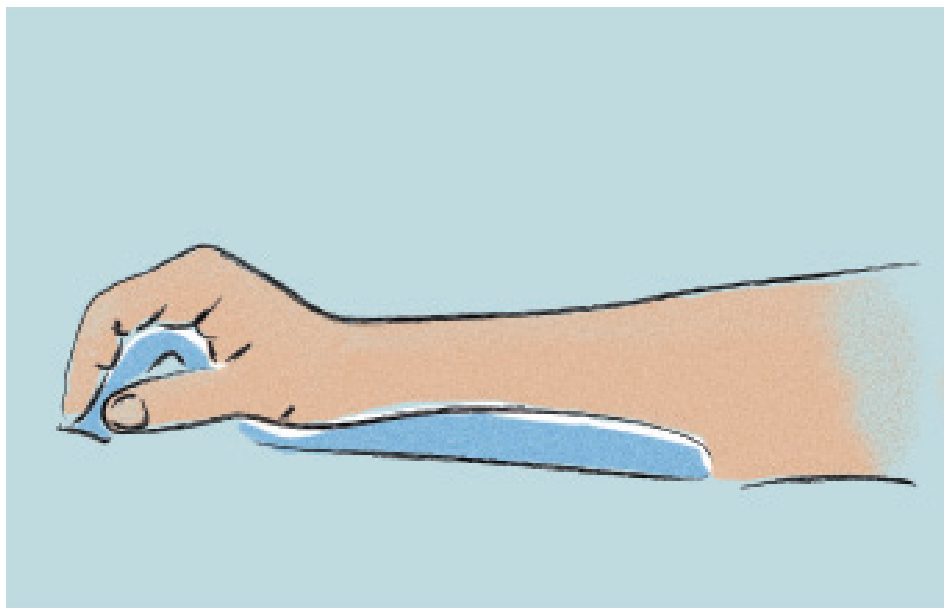

Modell der fertigen Schiene


Das Schnittmuster kann auch als dorsale Schiene verwendet werden.

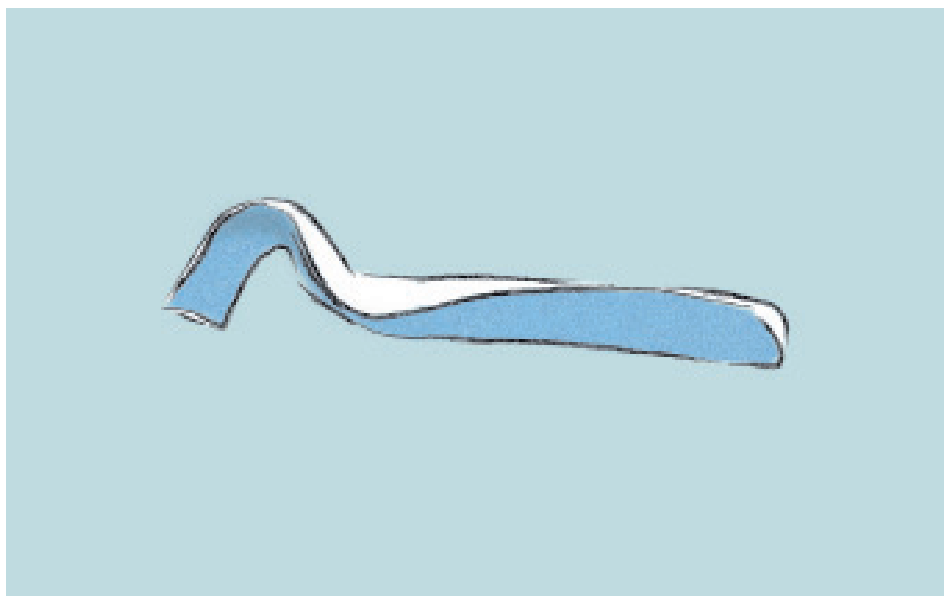

Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.

Die Schiene vom Handgelenk aus dorsal anlegen und hinter den Mittelhandknöcheln schräg abschneiden.

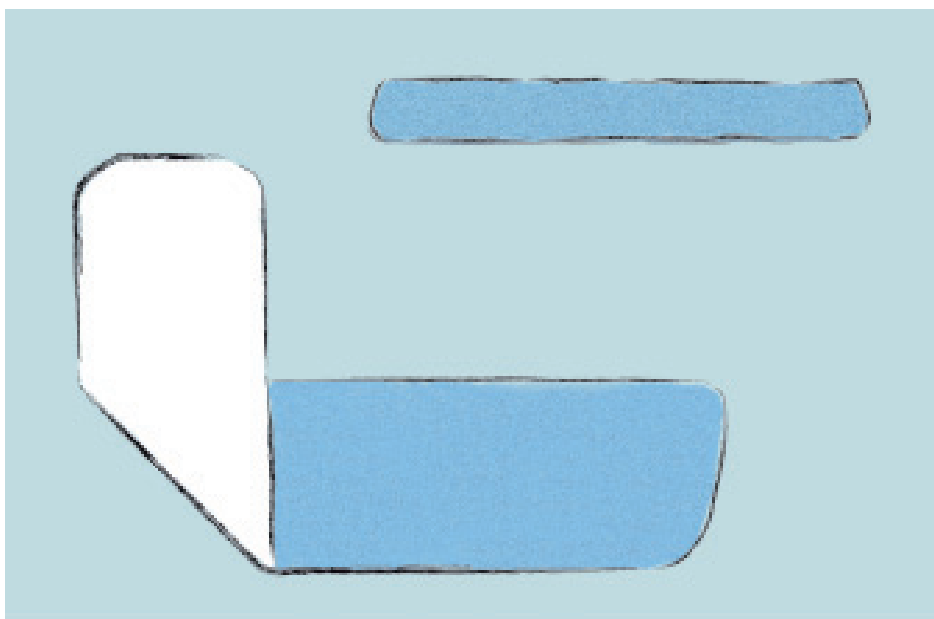


Anlage


Nach dem Anfeuchten die Schiene vom Handgelenk aus dorsal anlegen, am Ellenbogen im 90° Winkel umlegen und die Schiene anwickeln. Am Ellenbogen soll die doppelt gefaltete Schiene etwas fester angewickelt werden.

Das Olecranon bleibt frei.

Anmodellieren und aushärten lassen.

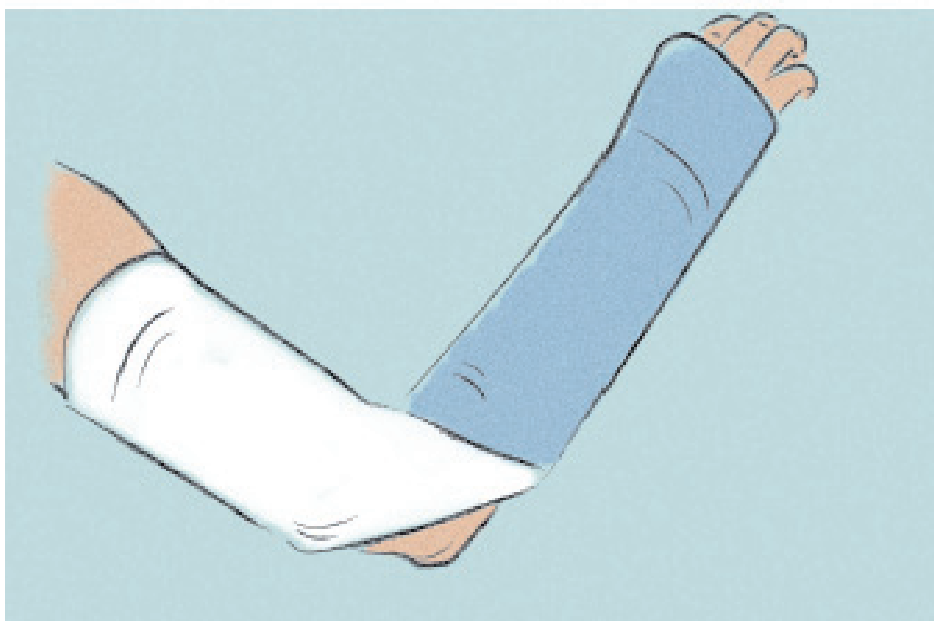

Modell der fertigen Schiene

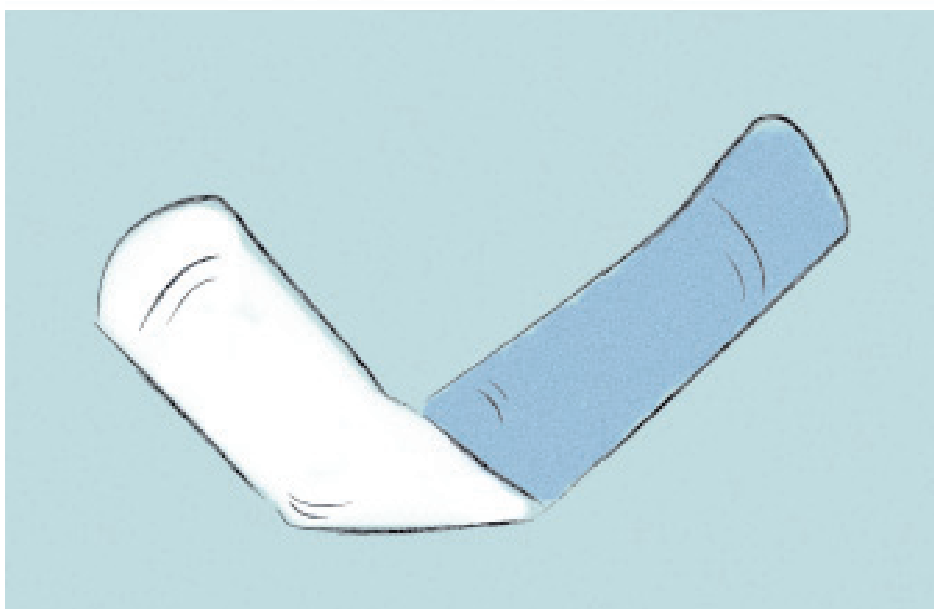


Schnittmuster

Von der 7,5cm oder 10,0cm breiten Schiene die erforderliche Länge abschneiden.

Die Schiene vom Handgelenk aus dorsal anlegen und hinter den Mittelhandknöcheln schräg abschneiden.


Auch an der proximalen Seite wird die Schiene schräg geschnitten (Trapezform).

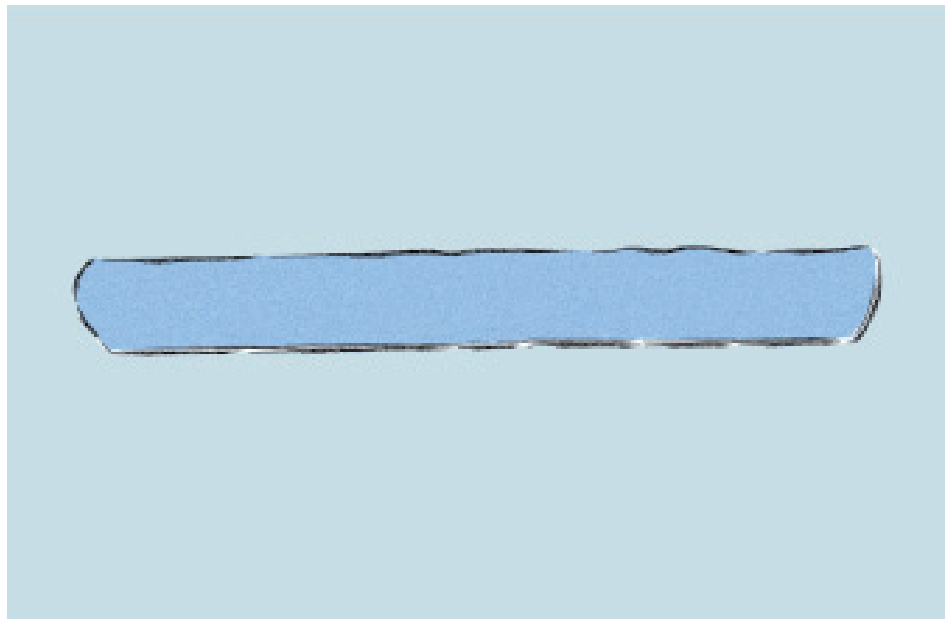


Anlage

Nach dem Anfeuchten die Schiene vom Handgelenk aus dorsal anlegen, volar unter dem Ellenbogen herum (der Sulcus Ulnaris soll frei bleiben) und anschliessend lateral am Oberarm entlang führen, anwickeln.

Anmodellieren und aushärten lassen.

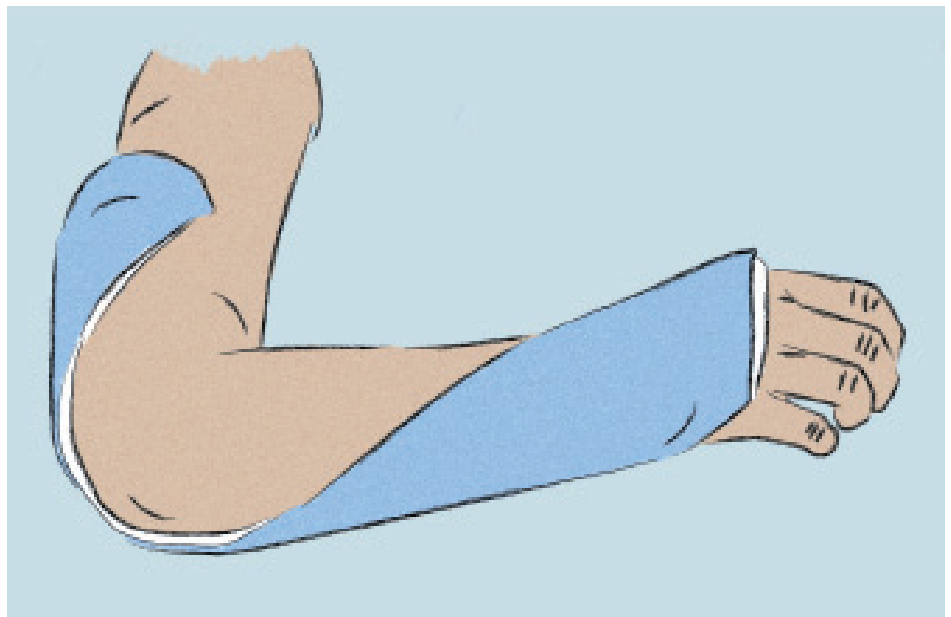


Modell der fertigen Schiene

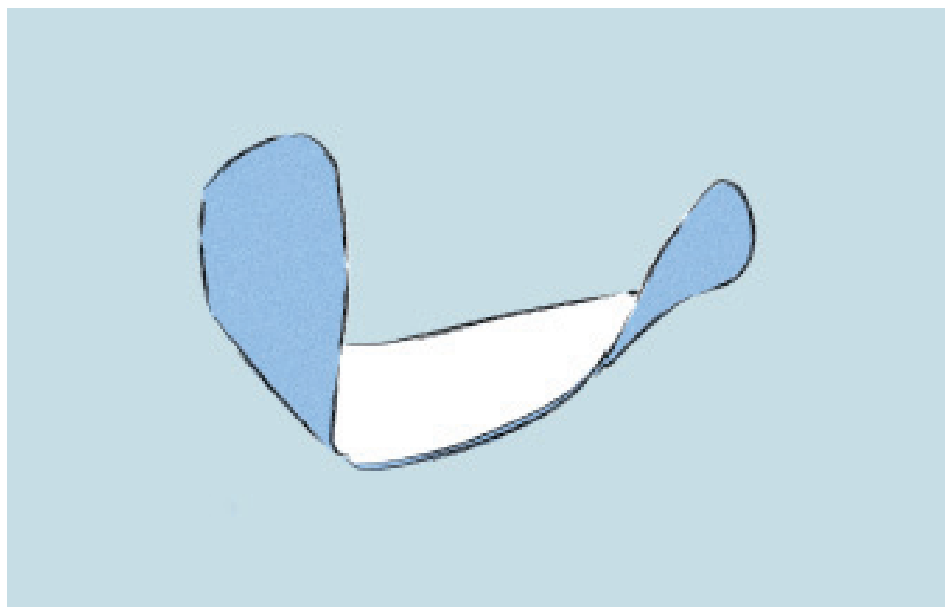

Schnittmuster


Von der 7,5cm und/oder 10,0cm breiten Schiene die erforderlichen Längen abschneiden (die Breite der Fußplatte kann variieren).

An der Fußplatte wird proximal das blaue Polster in der Breite der U-Schiene ausgespart. In der Mitte der U-Schiene wird entsprechend das weiße Polster ausgeschnitten.

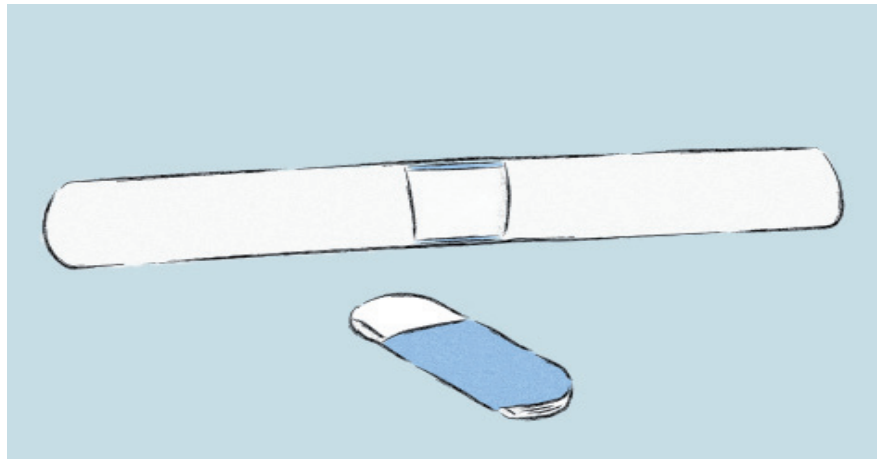


Anlage

Nach dem Anfeuchten werden die ausgesparten Enden der beiden Schienen aufeinander gelegt.

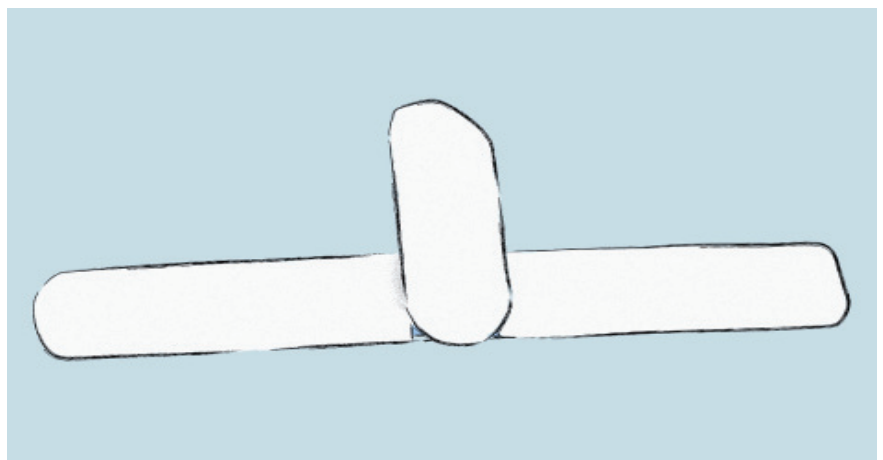


Die Schiene wird in U-Form um den Unterschenkel gelegt. Der Fuß wird in die gewünschte 90° Position gebracht, die Schiene wird angewickelt.

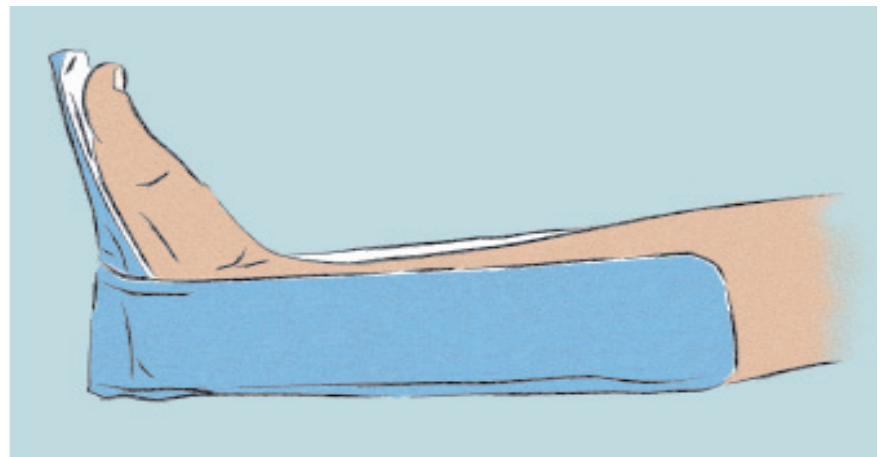

Anmodellieren und aushärten lassen.

Modell der fertigen Schiene

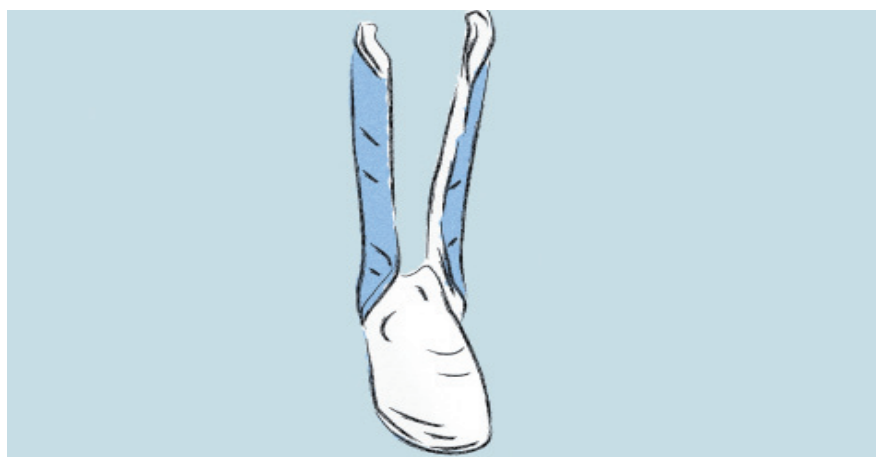

Fragen und Anregungen

Für Ihre Fragen oder Anregungen rund um das Thema „moderne Stützverbandtechnik“ stehen Ihnen unsere Immobilisationsexperten gerne unter expertenteam@aescologic.de oder unter unserer kostenlosen Servicenummer 0800 - 11 58 980 zur Verfügung.

Gerne informieren wir Sie auch über unsere innovative Schienenversorgung mit **UFS-Korkschiene** *.

einfach



schnell



sauber



* in fast allen KV-Gebieten als Sprechstundenbedarf abrechenbar